


Configuración Ratón o ratón controlado con la cabeza

Haz clic en la barra de menú, Configuración, y Acceso. A continuación selecciona **Ratón o ratón controlado con la cabeza**.

Activar

Elige cómo se activarán las celdas – por ejemplo al hacer clic, al mantener pulsado, por espera o con conmutador.


Dependiendo del método de activación seleccionado, aparecerán nuevas opciones - por ejemplo, tiempo de espera o apariencia del indicador de cuenta atrás.

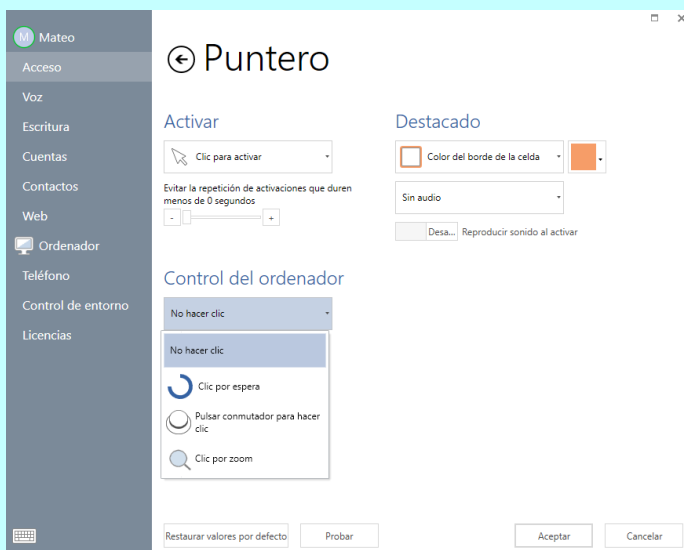

Se pueden reducir las activaciones accidentales descartando las repeticiones si no ha pasado un determinado tiempo desde la anterior activación.

Destacado

Cambia el modo de resaltar una celda seleccionada. Puedes variar el color de fondo, el borde o ampliar la celda.

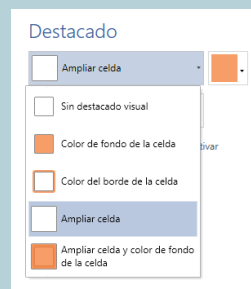


Configuración Ratón y ratón controlado con la cabeza

Control del ordenador

Opciones de activación con ratón al utilizar Grid 3 para controlar otros programas o el sistema operativo de Windows.

Elige entre clic por espera, pulsar conmutador para hacer clic, clic por zoom o no hacer clic. Dependiendo del método de activación aparecerán más opciones.

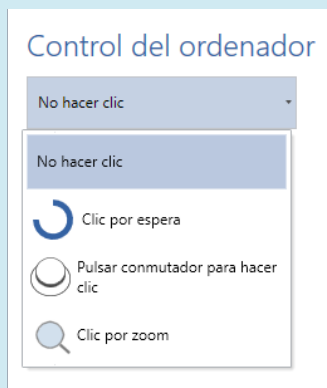

Clic por zoom

El clic por zoom permite seleccionar un elemento pequeño con gran precisión mediante la ampliación gradual del zoom. Se puede ajustar tanto el nivel de ampliación como el tiempo de zoom.

Este método de acceso también está disponible para usuarios de control con la mirada.

