

Configuración Mirada



Si aún no tienes configurada la cámara para el control con la mirada, instálala y conéctala al ordenador siguiendo las instrucciones de la cámara.


Haz clic en la barra de menú y selecciona **Configuración, Acceso y Mirada**.

Cámara

Selecciona tu cámara en el desplegable.

Elige entre seguir un ojo o seguir los dos (esta opción no está disponible para todas las cámaras).

Puedes ajustar el suavizado para reducir desviaciones.

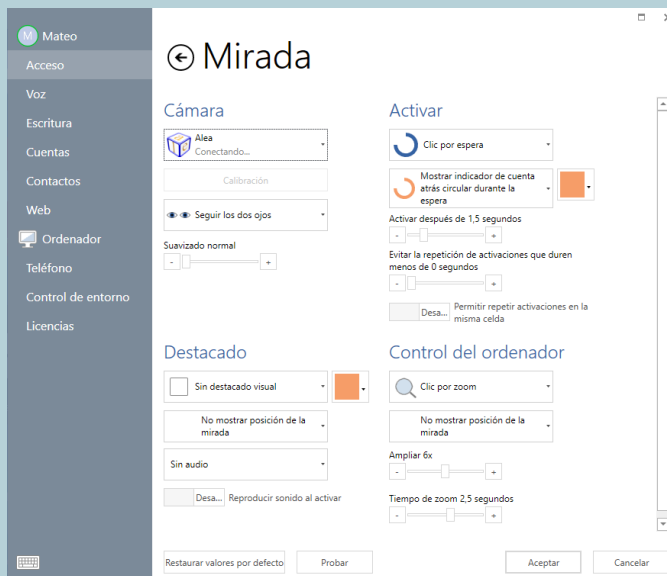

Activar

Elige el tipo de activación de celda: por espera, por parpadeo o por conmutador. Dependiendo del método de activación seleccionado, aparecerán nuevas opciones de ajuste disponibles.

Destacado

Elige el tipo de destacado de las celdas seleccionadas.

Elige entre mostrar o no la posición de la mirada (un pequeño punto).

Elige si utilizar audiodescripción.

Configuración Mirada

Calibración

Es necesario calibrar la mirada para seleccionar con precisión.

Antes de calibrar asegúrate de que el usuario se encuentra en una posición correcta con respecto a la cámara. Una cara sonriente en el monitor de Windows indica que la posición del usuario es correcta; si la cara es roja significa que está demasiado cerca o lejos.



El proceso de calibración consiste en mirar una serie de puntos. El color y el tamaño de los puntos se puede personalizar. También puedes elegir una imagen personalizada – en Punto de calibración, haz clic en Imagen personalizada y Explorar.

Número de puntos de calibración – elige 2, 5 o 9 puntos. Cuantos más puntos de calibración elijas, más preciso será el resultado. Elige entre movimiento de los puntos automático o manual. Elige la velocidad de calibración. Haz clic en Calibrar para empezar.

Al obtener los resultados puedes hacer clic en uno de los puntos para mejorar la calibración o seleccionar Mejorar calibración para corregirlos todos. (Siempre que sea posible los puntos de color rojo se deberían mejorar).

Smartbox

thinksmartbox.com